



درجه پخت پودر های پرسن شوفو (PFM)

	درجه دمای خشک کردن پودر	زمان خشک کردن پودر	زمان pre-heating	دمای شروع وکیوم	سرعت افزایش دما	دمای پخت نهایی	دمای پایانی وکیوم	Hold Time	Cooling Time
اپک واش پودری	۵۰.۰°C	۵ دقیقه	۱ دقیقه	۵۰.۰°C	۶۰°C/min	۹۶.۰°C	۹۶.۰°C	۱ دقیقه	۰-۳۰ ثانیه
اپک دوم پودری	۵۰.۰°C	۵ دقیقه	۱ دقیقه	۵۰.۰°C	۶۰°C/min	۹۵.۰°C	۹۵.۰°C	۱ دقیقه	۰-۳۰ ثانیه
اپک واش خمیری	۵۰.۰°C	۵ دقیقه	۱ دقیقه	۵۰.۰°C	۶۰°C/min	۹۶.۰°C	۹۶.۰°C	۱ دقیقه	۰-۳۰ ثانیه
اپک دوم خمیری	۵۰.۰°C	۵ دقیقه	۱ دقیقه	۵۰.۰°C	۶۰°C/min	۹۵.۰°C	۹۵.۰°C	۱ دقیقه	۰-۳۰ ثانیه
مارجین (پخت اول)	۶۵.۰°C	۵ دقیقه	۱ دقیقه	۶۵.۰°C	۵۰°C/min	۹۴.۰°C	۹۴.۰°C	۳۰ ثانیه	۰-۳۰ ثانیه
مارجین (پخت دوم)	۶۵.۰°C	۵ دقیقه	۱ دقیقه	۶۵.۰°C	۵۰°C/min	۹۳.۰°C	۹۳.۰°C	۳۰ ثانیه	۰-۳۰ ثانیه
پخت اول سرویکال , دنتین اپک دنتین , انسيزال تمامی افکت ها	۶۵.۰°C	۵ دقیقه	۲ دقیقه	۶۵.۰°C	۵۰°C/min	۹۱.۰°C	۹۱.۰°C	۳۰ ثانیه	۰-۳۰ ثانیه
پخت دوم سرویکال , دنتین اپک دنتین , انسيزال تمامی افکت ها	۶۵.۰°C	۵ دقیقه	۲ دقیقه	۶۵.۰°C	۵۰°C/min	۹۰.۰°C	۹۰.۰°C	۳۰ ثانیه	۰-۳۰ ثانیه
خمیر گلپز و استین ها	۶۰.۰°C	۵ دقیقه	۲ دقیقه	-----	۶۰°C/min	۸۷.۰°C	-----	-----	۰-۳۰ ثانیه
پودر رنگ لئه	۶۵.۰°C	۷ دقیقه	۲ دقیقه	۶۵.۰°C	۵۰°C/min	۹۰.۰°C	۹۰.۰°C	۳۰ ثانیه	۰-۳۰ ثانیه
گلپز پودر رنگ لئه	۶۵.۰°C	۵ دقیقه	۲ دقیقه	-----	۶۰°C/min	۹۰.۰°C	-----	۳۰ ثانیه	۰-۳۰ ثانیه
پودر ترمیم	۶۵.۰°C	۵ دقیقه	۱ دقیقه	۶۵.۰°C	۶۰°C/min	۸۷.۰°C	۸۷.۰°C	۳۰ ثانیه	۰-۳۰ ثانیه
گلپز پودر ترمیم	۶۵.۰°C	۵ دقیقه	۲ دقیقه	-----	۶۰°C/min	۸۷.۰°C	-----	۳۰ ثانیه	۰-۳۰ ثانیه